

Zalecenia dotyczące pakowania próbek materiału klinicznego (substancje zakaźne kategorii B) wysyłanych do badań w Laboratorium Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP PZH-PIB

ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa

Ze względu na potencjalnie zakaźny charakter próbek materiału klinicznego obowiązują następujące zasady pakowania próbek:

A. Materiał do analiz (próbka do badania) należy umieścić w szczelnych pojemnikach, które powinny być:

- jednorazowe, jałowe, wykonane z nietłukącego tworzywa sztucznego, odporne na zgniecenie;
- zamykane nakrętką zapobiegającą wyciekowi materiału;
- otwierane i zamykane w nieskomplikowany sposób;

Pojemniki z materiałem do analiz należy umieścić w opakowaniu wtórnym.

B. Opakowanie wtórne powinno być wykonane z odpornych na zgniecenie materiałów i zamykane. Opakowanie wtórne musi mieć wymiary umożliwiające otwarcie go w boksie laminarnym (wymaganie BHP). **Dokumentacja dołączona do próbek nie może być umieszczana w opakowaniu wtórnym.**

C. Opakowanie transportowe (np. sztywne pudełko kartonowe) musi być oznakowane znakiem UN 3373 lub Substancja biologiczna, kategoria B i opisane w sposób identyfikujący klienta. Na opakowaniu transportowym powinna znaleźć się również **nazwa laboratorium**, w którym wykonywane ma być badanie (tj. Laboratorium Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych).

Dokumentację dołączoną do badań (tj. **zlecenie badania**) należy **umieścić w przytwierdzonej na zewnątrz opakowania transportowego zamkniętej kopercie**, w taki sposób aby możliwy był dostęp do dokumentacji bez konieczności otwierania opakowania transportowego.