

**Instrukcja pobierania materiału do badań in vivo – wykrywanie toksyny botulinowej  
w Laboratorium Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP PZH-PIB  
ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa**

**Badanie wykonywane wyłącznie w przypadku zatruc pokarmowych i na zlecenie lekarza.**

Materiałem do badań jest **surowica**. Próbkę surowicy pobrać **przed podaniem antytoksyny botulinowej** w ilości nie mniejszej niż 5 ml. Krew należy pobierać jałowo na skrzep, odciągnąć surowicę. Próbką surowicy powinna być transportowana do laboratorium w jałowej, szczelnie zamkniętej probówce w temperaturze otoczenia w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od jej pozyskania lub do 5 dni przy zachowaniu temperatury 5°C ( $\pm 3^{\circ}\text{C}$ ). Jeżeli próbka surowicy będzie przechowywana lub transportowana w czasie dłuższym niż 5 dni, należy ją zamrozić w temperaturze co najmniej  $-20^{\circ}\text{C}$  i przechowywać oraz transportować w stanie uniemożliwiającym jej rozmrożenie.