

**Informacja o sposobie pobierania i transportu surowicy/
krwi do badań serologicznych**

**w Laboratorium Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP PZH-PIB
ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa**

W większości zakażeń swoiste przeciwciała dla antygenów bakteryjnych pojawiają się dopiero pod koniec pierwszego lub na początku drugiego tygodnia choroby. W przypadku uzyskania wyniku wątpliwego w pierwszym badaniu wskazane jest pobranie drugiej próbki krwi po około 10-14 dniach od pierwszego pobrania i ponowne wykonanie badań serologicznych.

Materiał kliniczny do badań powinien być dostarczony w czystych, szczelnych naczyniach, jednoznacznie oznakowanych (co najmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta).

Wymagania dotyczące poszczególnych rodzajów próbek materiału klinicznego:

Próbka krwi. Krew do badań powinna być pobrana od badanej osoby na czczo lub 2-4 godzin po lekkim posiłku, przy zachowaniu dotychczasowej diety. Krew należy pobierać jałowo na skrzep w objętości nie mniejszej niż 2 ml. Probka krwi powinna być przetransportowana do laboratorium w jałowej, szczelnie zamkniętej probówce w temperaturze otoczenia w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od pobrania lub w ciągu 24 godzin przy zachowaniu temperatury 5°C ($\pm 3^{\circ}\text{C}$).

Próbka surowicy krwi. Surowica krwi powinna być dostarczona w objętości nie mniejszej niż 0,5 ml. Probka surowicy powinna być transportowana do laboratorium w jałowej, szczelnie zamkniętej probówce w temperaturze otoczenia w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od jej pozyskania lub do 5 dni przy zachowaniu temperatury 5°C ($\pm 3^{\circ}\text{C}$). Jeśli próbka będzie przechowywana lub transportowana w czasie dłuższym niż 5 dni, należy ją zamrozić w temperaturze poniżej -20°C.